

赤外線補聴システム（アシストホーン）は軽度から中度の難聴者から

補聴器を持たない一般の方までご利用いただける

バリアフリーなシステムです。

補聴器に合わせて聞き方2タイプ


①ヘッドフォン

補聴器を持たない高齢者や「T」スイッチのない補聴器をお使いの方、また、要約筆記の方や一般の方も使用できます。

②インダクター


補聴器のスイッチを「T」に切り替えて使用します。耳掛け式のシルエットタイプと、首掛け式のネックレールの2種類があります。

各部の名称と働き

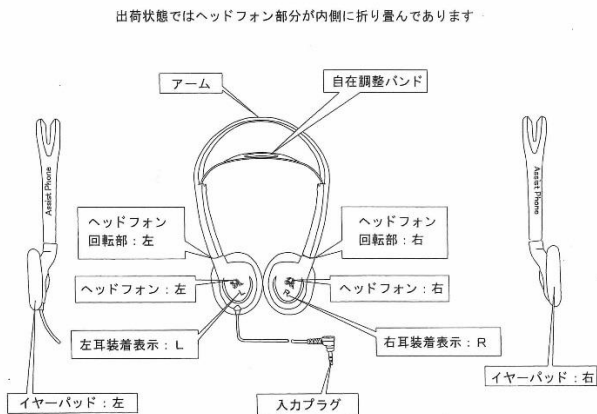


本ヘッドフォンは収納効率を考慮しヘッドホン本体をアームの根本で90度内側に回転させ状態で出荷しています。

1. ヘッドフォンは左右の耳の装着方向が本体表面に文字で表示してあります。
L: 左耳に装着します(左耳側にはコードがついています)
R: 右耳に装着します
2. 入力プラグは指定された赤外線受信機の指定された入力ジャックに挿入してください。
3. アームに設けられた自在調整バンドが個々の頭の大きさに合わせて収縮し自然にフィット出来るよう機能します。
4. イヤープッドは交換できます。
イヤープッドの端を軽くつまみながら外します。

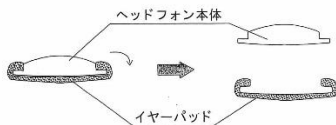

基本的な使いかた

ヘッドフォンには装着方向がありますので本体に表示の文字で確認します。

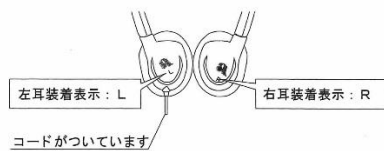

出荷状態からヘッドフォン部分を90度外側に回転させると装着状態になります

